


| | | | | |
|---|--|-----------|--------|--------|
| 1 | Kompleman C2 Test Kodu : 8616004 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : RİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 21 gün sonra | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Serum | Jelli Tüp | 0,3mL | <0°C |

| | | | | |
|---|--|---------------|--------|---------|
| 2 | Nitisinon Test Kodu : 8403004 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : LC-MS/MS - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Kapiller Kan | Filtre Kağıdı | | 18-24°C |
| | Ek Bilgiler  | | | |
| | Kapiller Kan Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır. | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|--------|--------|
| 3 | Acetaminophen (Paracetamol) Test Kodu : 8200301 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : LC-MS/MS - Çalışma Günü : Pzt 12:00 Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Cmt 18:00 | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Serum | Jelsiz Tüp | 0,3mL | 2-8°C |

4

Coombs, İndirektTest Kodu : **8688501** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **JEL SANTRİFÜGASYON** - Çalışma Günü : **Pzt 12:00 Çar 12:00** - Raporlama Tarihi : **Sal 18:00 Per 18:00**

| Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
|-----------------------|------------------|--------|---------|
| Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 4mL | 18-24°C |
| Tam Kan | EDTA-Mor Kapak | | |

Ek Bilgiler**Serum ve EDTA Tam Kan**

Test istenen bireyde gebelik olup olmadığı, gebelik mevcut ise gebelik haftası, Anti-D aşısının yapıp yapılmadığı, yapılmış ise tarihinin belirtilmesi, kan grubu sonucu bilgisi ve transfüzyon/transplantasyon yapıp yapılmadığı bilgisi gerekmektedir. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için "İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.

5

Coombs, İndirekt, TitrimetrikTest Kodu : **8688502** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **JEL SANTRİFÜGASYON** - Çalışma Günü : **Pzt 12:00 Çrş 12:00** - Raporlama Tarihi : **Sal 18:00 Per 18:00**

| Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
|-----------------------|------------------|--------|---------|
| Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 4mL | 18-24°C |

Ek Bilgiler**Serum ve EDTA Tam Kan**

Test istenen bireyde gebelik olup olmadığı, gebelik mevcut ise gebelik haftası, Anti-D aşısının yapıp yapılmadığı, yapılmış ise tarihinin belirtilmesi, kan grubu sonucu bilgisi ve transfüzyon/transplantasyon yapıp yapılmadığı bilgisi gerekmektedir. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.


| 6 | Antikor Tanımlama (11 Antikor) Test Kodu : 8687001 - Laboratuvar Hizmetleri | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------|--------|--------|-----------------------|------------------|------|---------|
| | Yöntem : JEL SANTRİFÜGASYON - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 | | | | | | | | |
| | <table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum ve EDTA Tam Kan</td><td>Jelli Tüp + EDTA</td><td>10mL</td><td>18-24°C</td></tr></tbody></table> | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma | Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 10mL | 18-24°C |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma | | | | | |
| Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 10mL | 18-24°C | | | | | | |
| Ek Bilgiler  | | | | | | | | | |

Serum ve EDTA Tam Kan
Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.

| 7 | Soğuk Aglütininer Test Kodu : 8615701 - Laboratuvar Hizmetleri | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------|-----|-------|---------|----------------|--|--|
| | Yöntem : JEL SANTRİFÜGASYON - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cum 18:00 | | | | | | | | | | | | |
| | <table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum ve EDTA Tam Kan</td><td>Jelli Tüp + EDTA</td><td>4mL</td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Tam Kan</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma | Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 4mL | 2-8°C | Tam Kan | EDTA-Mor Kapak | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma | | | | | | | | | |
| Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 4mL | 2-8°C | | | | | | | | | | |
| Tam Kan | EDTA-Mor Kapak | | | | | | | | | | | | |
| Ek Bilgiler  | | | | | | | | | | | | | |

Serum ve EDTA Tam Kan
Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.

| | | | | |
|---|--|------------------|---------------|---------------|
| 8 | Soğuk Aglütininler (Titre) Test Kodu : 8615702 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : JEL SANTRİFÜGASYON - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cum 18:00 | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Serum ve EDTA Tam Kan | Jelli Tüp + EDTA | 4mL | 2-8°C |
| Ek Bilgiler  | | | | |
| Serum ve EDTA Tam Kan Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir. | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------|---------------|---------------|
| 9 | Preeklampsi sFlt-1/PIGF oranı Test Kodu : 8742503 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : ECLİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Serum | Jelli Tüp | 1mL | <0°C |
| Klinik Bilgileri  | | | | |
| Preeklampsi gebeliğin 20. Haftasından sonra hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize edilen ciddi bir gebelik komplikasyonudur. Tüm gebeliklerin %3-5 inde görülür ve önemli maternal ve fetal veya neonatal mortalitesi ve morbiditesi ile sonuçlanır. Dolaşımdaki PIGF ve sFlt-1 düzeyleri klinik semptomlar oluşmadan dahi normal gebeliği preeklampside ayırabildiği ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Preeklampsi geliştiren kadınlarda normal gebeliğe oranla sFlt 1 düzeylerinin daha yüksek ve PIGF düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. sFlt 1'in PIGF'ye oranının iki ölçümün tek başlarına kullanılmasına kıyasla preeklampsiyi daha iyi öngördüğü gösterilmiştir. | | | | |

| | |
|----|--|
| 10 | |
|----|--|