

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(09.01.2023)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8301839	s-Fenilmerkaptürük Asit							X			
2	C8208501	Aldolaz								X		
3	C8557602	Trombosit Fonksiyon Testleri		X	X	X		X				
4	C8259501	Kriyoglobülin				X						
5	C8524002	ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)			X							

1	<b>s-Fenilmerkaptürük Asit</b> Test Kodu : <b>8301839</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>LC-MS/MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>10 gün sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	İdrar	Plastik Kap	3mL	2-8°C

2	<b>Aldolaz</b> Test Kodu : <b>8208501</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ENZİMATİK</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

3	<b>Trombosit Fonksiyon Testleri</b> Test Kodu : <b>8557602</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İMPEDANS AGREGOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 16:00 Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Tam Kan	Hirudinli Tüp	2mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
<b>Tam Kan</b> Programlı test! Lütfen laboratuvara danışınız. Testin çalışılması için taze örnek gerekmekte olup, örneğin maksimum 3 saat içerisinde laboratuvarında olması gerekmektedir. İki Hirudinli (TI- VAC) tüplere tam kan alınmalıdır. Örnek stabilitesi nedeniyle kan örneğinin kurye saatine yakın alınması önemlidir. Hafta içi 16.00'a kadar hafta sonu 12.00 a kadar örnek merkeze ulaşmış olmalıdır. <b>ANTIPLATELET İLAÇLAR VE TROMBOSİT FONKSİYON TESTİ İÇİN HASTA TAKİP FORMU</b> bilgi formunda örnek alım saati ve kullanılan ilaçların belirtilmesi önemlidir. Bilgi formu için laboratuvara danışınız.				

4	<b>Kriyoglobülin</b> Test Kodu : <b>8259501</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>MANUEL</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Laboratuvara Danışınız</td><td>Jelsiz Tüp</td><td></td><td>37°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Laboratuvara Danışınız	Jelsiz Tüp		37°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Laboratuvara Danışınız	Jelsiz Tüp		37°C						
<b>Ek Bilgiler</b> 									

**Laboratuvara Danışınız**  
Kan örneği; 37°C'lik etüvde 10 dk bekletilen 2 adet 10 ml'lik jelsiz tüpe alınmalıdır. Tüpler, 37°C'de bekletilerek serumun kendiliğinden ayrılması sağlanır (santrijüj yapılarak serum ayrılmamalıdır). Kendiliğinden ayrılan serumlar 2 sekonder tüpe ve her tüpe en az 4 mL olacak şekilde aktarılır. Sekonder tüplere aktarılan serum örnekleri 37°C'de transfer edilmelidir. Hemolizli ve lipemik örnek kabul edilmez.

5	<b>ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)</b> Test Kodu : <b>8524002</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</td><td>Sitrata-Mavi Kapak</td><td>4mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	4mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	4mL	<0°C					